

PHILIPS

クイック・ユーザー マニュアル

Lumify 5.1




1. トランスジューサの接続

1. USBトランスジューサ・ケーブルのUSBマイクロコネクタを、トランスジューサのコネクタに接続します
2. コネクタのハウジングをトランスジューサに向かってスライドします
3. USBトランスジューサ・ケーブルをデバイスのコネクタに接続します
4. メッセージが表示されたら、[Use By Default for This USB Device]を選択します
5. [OK]をタッチします



2. 検査の開始

1. [Scan/Create Patient]画面で、検査プリセットをタッチします
2. クリックIDを作成し、すぐにスキャンを開始する場合は[Scan]をタッチします
3. スキャンを開始する前に患者情報を入力する場合は、[Create Patient]をタッチして患者の情報を入力し、[Start Exam]をタッチします

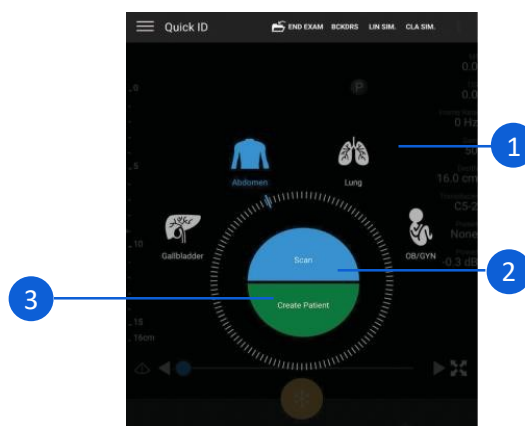


3. 画像コントロールとモードの変更

画像コントロール

1. [Depth] : 深さの変更
2. [Gain] : 画像の輝度調整
3. ズーム : 2本の指でピンチ、1本の指でドラッグするとパンになります

モードの変更

4. [Color Flow] : カラー Doppler
 - ・ [Fast Flow] : 高いカラースケールを用いたカラー Doppler
 - ・ [Slow Flow] : 低いカラースケールを用いたカラー Doppler* プリセットによっては上記の選択がない場合があります
5. [PW] : パルス Doppler
6. [M-Mode] : Mモード

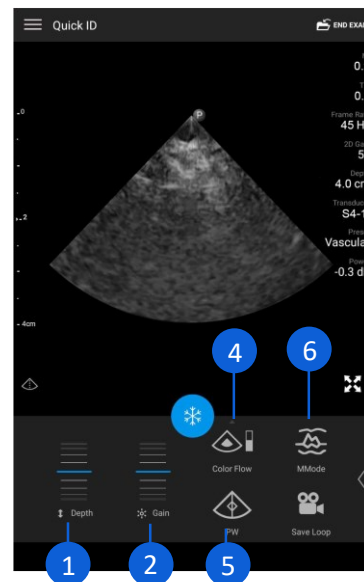

4. 画像の取り込み

1. 静止画の取り込み : でフリーズし、[Save Image] をタッチします
2. 動画の取り込み : [Save Loop] をタッチして取り込みを開始し、もう1度タッチ して停止します


5. 計測

1. [Freeze] をタッチしてフリーズします
2. [Measure] をタッチします
3. 2点間の距離を計測したい場合
[Distance] をタッチします。最初にキャリパを目的の位置にドラッグし、次にもう1点のキャリパを同じようにドラッグします

楕円計測を行いたい場合


[Ellipse] をタッチします。コントロールポイントをタッチして目的の位置に楕円をドラッグし、調整します

4. 表示される計測と画像を保存するには、[Save Image]をタッチします
5. 削除するには[Clear ALL]をタッチします

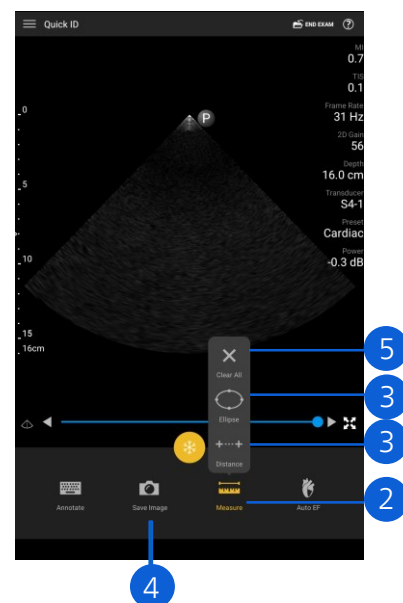

6. 検査のレビューと削除

1. 検査中にレビューを行うには画面左上の [Menu] をタッチし、[Review Exam] をタッチします
2. 検査の終了後にレビューを行うには、[Saved exam] をタッチし、レビューする検査を選択します
3. 静止画または動画を削除するには[Done]が画面の左上に表示されるまでサムネイルをタッチし、[Delete] をタッチします
4. レビューを終了して現在の検査に戻るには、[Current Exam] をタッチします

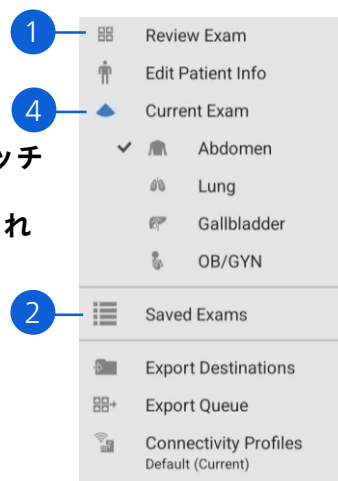

7. 検査の終了とEmailでのエクスポート

1. スキャン画面右上の[End Exam]をタッチし、検査を終了します
2. レビュー画面で保存した検査を開きます
3. エクスポートする静止画と動画を選択します
検査を選択するには、[Export Exam] をタッチします
静止画と動画を選択するには[Done]が画面の左上に表示されるまで各サムネイルをタッチし、[Export Selected] をタッチします
4. [Email]をタッチします
5. [Notice]の文書を読んだら、[Continue]をタッチします
6. [Pick an Email Application to Use]ダイアログ・ボックスが表示されたら、リストから電子メールのアプリケーションを選択し、[Continue]をタッチします
7. 電子メールに受信者とテキストを追加し、電子メールを送信します





製造販売業者

株式会社フィリップス・ジャパン

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1
麻布台ヒルズ森JPタワー15階

お客様窓口 03-3740-3213

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

www.philips.co.jp/healthcare

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「お客様窓口」までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

販売名：超音波画像診断装置 Lumify
製造販売認証番号：302AFBZX00043000
管理医療機器／特定保守管理医療機器