

# PHILIPS

## 電子メールでの データ送信

Lumify 5.1





delete this resource slide before sharing your file

## はじめに


電子メールで患者データを送信する場合、初回のみ設定が必要です。送信されるデータは、個人情報（患者名、MRNなど）が消去された状態で送信されます。

## 電子メールによるデータ転送


1. タブレットの電源を入れます
2. [Lumify]アプリケーションを起動します
3. [メニュー] （画面左上）から、[Saved Exam]  をタップします
4. メール転送する検査をタップすると、[Review]に検査が表示されます
5. 検査の画像をすべて送信する場合：[Export Exam]  をタップします
6. 検査画像の一部を選択して送信する場合：  
サムネイル画像を長押しし、[Export Selected]  をタップします  
\*選択された画像は黄色枠で表示されます
7. [Email]をタップします  
[Notice]（プライバシー通知メッセージ）を確認し、[Continue]をタップします

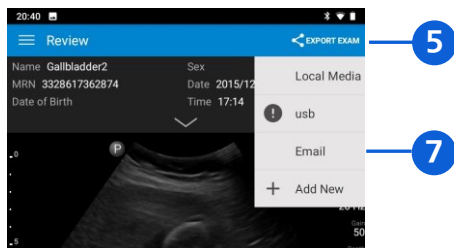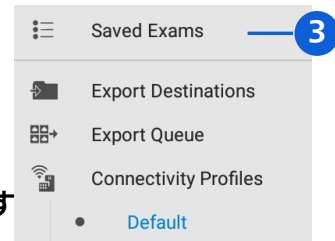

8. [Pick an Email Application to Use]が表示されたら、[Always]をタップします  
\*設定する電子メールをデフォルトとして設定します
9. [Gmailへようこそ]と表示されたら、[スキップ]（画面左下）をタップします
10. [+ メールアドレスの追加]をタップします

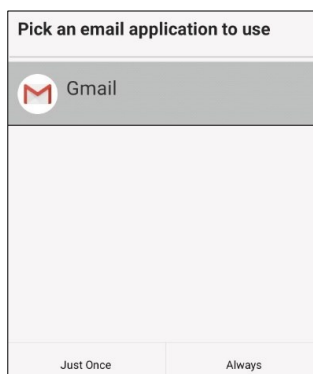

## 11. [メールのセットアップ]で、使用している電子メールの設定、ログインを行います

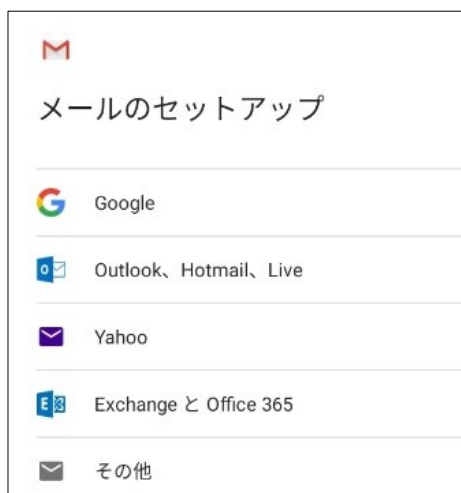

対応するアプリケーションでメールアドレスをお持ちでない場合は、メールアドレスの作成が必要です

## 12. 使用するメールアドレスをタップします


## 13. 送信先のメールアドレスを、[To]へ入力して送信します



すべてのメールアドレスを追加できるようになりました。詳細

○○○○  
Lumify-philips@gmail.com — 12

+ 他のメールアドレスを追加

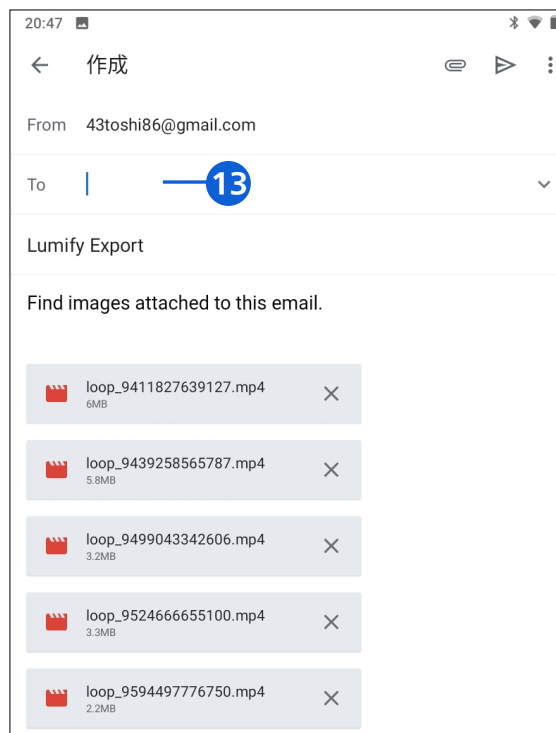



製造販売業者

**株式会社フィリップス・ジャパン**

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1  
麻布台ヒルズ森JPタワー15階

お客様窓口 03-3740-3213

受付時間 9:00 ~ 18:00 (土・日・祝祭日・年末年始を除く)

[www.philips.co.jp/healthcare](http://www.philips.co.jp/healthcare)

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「お客様窓口」までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

販売名 : 超音波画像診断装置 Lumify  
製造販売認証番号 : 302AFBZX00043000  
管理医療機器 / 特定保守管理医療機器