

PHILIPS ZOOM!

Procédure clinique Zoom 6%



Avant

- Faire les gouttières thermoformées pour le traitement ambulatoire.

Pendant




- **Placer l'écarteur dans la bouche du patient** en veillant à ce que la flèche soit dirigée vers le haut.
- Pour cela, il est possible de le plier en deux dans le sens de la largeur. L'écarteur est très flexible, doux et confortable.
- Au besoin, montrer au patient comment insérer l'écarteur lui même.

Flèche vers le haut



Sens de pliure

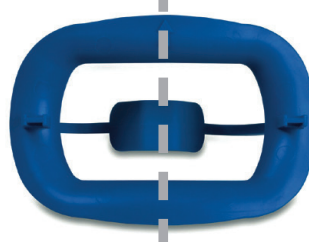

- **Prendre la teinte** à l'aide du teintier habituel :
Vita Bleachedguide
Vita Classic classé par ordre de luminosité :
B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D4 A3 D3 B3 A3.5 B4 C3 A4 C4.
- **Faire la photo « avant »** avec la référence couleur.



- **Mettre les lunettes ZOOM** au patient, au praticien et à l'assistante ou à toute personne assistant à la procédure.
- **Insérer les deux rouleaux de coton** dans les vestibules inférieurs et supérieurs.
- **Ouvrir une compresse** et la rentrer entièrement dans la joue en commençant par un coin.
- **Protéger l'autre joue** de la même manière avec une autre compresse.



- **Mettre en place le masque protecteur** (commencer d'abord par un côté sous l'écarteur et ensuite l'autre).

Pendant (suite)



• Poser la digue photopolymérisable Liquidam™ :

Commencer avec l'embout fin, métallique. Appliquer la digue tout le long des rouleaux de coton placés dans les vestibules afin de les sceller à la gencive.

Toujours avec l'embout fin, placer la digue le long des collets dentaires, en descendant si besoin légèrement sur la dent pour une protection la plus efficace possible.

Avec l'embout plus large, appliquer la digue sur toutes les parties de la gencive encore exposées.

Photopolymériser la digue à chacune des étapes précédentes en opérant un mouvement de va-et-vient sur toute l'arcade pendant 5 à 10 secondes.

Vérifier à l'aide d'un miroir qu'il ne reste « AUCUNE ZONE ROSE » visible.

• Appliquer le pH booster sur toutes les dents à traiter. Pour cela, casser l'embout à la base du tube pour libérer un coton-tige imbibé de solution qui servira pour 2 sessions.

• Vider une demi-seringue de gel dans un godet et ajouter 4 gouttes de pH Booster avant de mélanger avec le pinceau. Appliquer ensuite directement sur les dents. Le mélange doit garder une consistance de gel.

• Positionner la lampe au plus près du patient et le guide lumière au contact de l'écarteur.

• Exposer les dents à la lumière pendant 15 minutes.

• Eloigner la lampe à la fin de la première session et retirer le gel en l'aspirant (ne pas irriguer pour ne pas décoller la protection).

• Réappliquer le pH booster puis remettre du gel comme précédemment et repositionner la lampe pour la seconde session de 15 minutes.

• Procéder de même pour la troisième et la quatrième session.

• Nettoyer les dents à l'aide de la seringue air/eau (élimination du gel).

• Oter la protection (compresses, rouleaux de coton et digue) à l'aide d'une pince.

• Prendre la nouvelle teinte à l'aide du teintier.

• Prendre la photo « après » avec la référence de la teinte et dans les mêmes conditions d'éclairage que la photo « avant ».

• Retirer l'écarteur.

• Donner au patient ses gouttières ainsi que les seringues pour le traitement ambulatoire (2 seringues de DayWhite® 6% ou de NiteWhite® 16%).

Après

- Commencer le traitement ambulatoire dès le lendemain : DayWhite® 6% : contact 30 minutes, 2 fois par jour, 3 jours de traitement, NiteWhite® 16% : contact 4 heures, port nocturne, 10 jours de traitement.
- Rappel : pour le DayWhite® et le NiteWhite®, une graduation de la seringue correspond au remplissage d'une gouttière pour une arcade.

- Ne pas consommer d'aliment susceptible de tâcher les dents (vin rouge, betterave, fruits rouges, café, thé...) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à au moins une semaine après la fin du traitement (traitement ambulatoire compris).

- De la même manière, limiter la consommation de tabac.

Pour une teinte stable sur le long terme :

- Revoir le patient chaque année pour un détartrage / polissage.
- Procéder à un rappel de traitement avec 1 à 2 seringues de DayWhite® 6% ou NiteWhite® 10% ou 16% une fois par an.



Vous souhaitez en savoir plus sur les produits Philips Zoom! ?

Rendez-vous sur notre espace professionnel : <https://www.philips.fr/c-m-pe/professionnels-dentaires>



Vous souhaitez commander Philips Zoom! ?

Rendez-vous sur : www.b2bshop.philips.com/dentistefr

Coordonnées de mon représentant Philips Sonicare

