

Pouzdana isporuka aerosola

Komora za inhalaciju OptiChamber Diamond pomaže dostaviti vaš lijek za inhalaciju u pluća, gdje on djeluje

Pažljivo slijedite upute navedene u ovom dokumentu te pročitajte i upute isporučene u kutiji OptiChamber Diamond.



1
Uklonite poklopce s inhalatora i komore za inhalaciju Diamond. Potražite i uklonite sva strana tijela unutar spremnika.



2
Čvrsto umetnite nastavak za usta Vašeg inhalatora sa stražnje strane komore za inhalaciju Diamond.



3
Ako vam je potrebna maska, postavite masku na vrh nastavka za usta i pažljivo okrenite dok se čvrsto ne uklopi.



4
Protresite komoru za inhalaciju i inhalator u skladu s uputama za inhalator.



5
Postavite usnice oko nastavka za usta kako biste postigli čvrsto prijanjanje. Izdahnite. Raspršite jedan oblačić lijeka u spremnik i odmah počnite polagano, ali duboko i potpuno, udisati.



6
Ako se oglasi upozorenje poput zviždanja, udišite polaganije. Zadržite dah do osam sekundi ili onoliko koliko vas uputi zdravstveni djelatnik, a zatim izdahnite.




7
Ako upotrebljavate masku, pritisnite i držite masku preko usta i nosa. Raspršite jedan oblačić lijeka u komoru za inhalaciju i zadržite prijanjanje tijekom pet do šest udisaja.



8
Kad korisnik izdahne, otvorit će se ventil za izdisanje pomoću kojeg možete brojati udisaje.

Tjedno čišćenje spremnika i maske

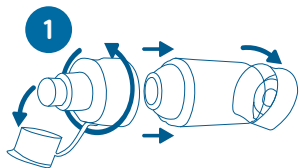


1
Uklonite poklopac, okrenite nastavak za usta kako biste ga razdvojili, uklonite prilagodljiv adapter za masku i masku (ako je upotrebljavate).




2
Komora za inhalaciju: uronite dijelove nekoliko puta u sapunastu vodu tijekom jedne minute, a zatim ostavite neka se natapaju 10 minuta.

Maska: uronite u sapunastu vodu tijekom dvije minute, a zatim ostavite neka se natapa 10 minuta.

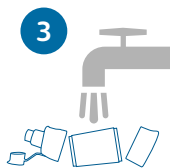

3
Isperite dijelove toplom čistom vodom te pustite neka se dijelovi temeljito osuše na zraku.

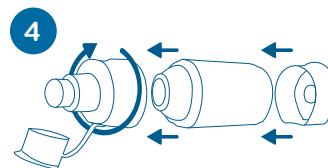

4
Ponovno spojite komoru za inhalaciju i čuvajte na čistom i suhom mjestu.

