




DreamMapper-App für Smartphone und Tablet


Herunterladen und Benutzerkonto anlegen

1. Herunterladen und beginnen

- a)  Laden Sie sich kostenlos DreamMapper aus dem iTunes oder Google Play Store für Ihr Smartphone oder Tablet herunter.



- b) Öffnen Sie die App und erlauben Sie DreamMapper Ihnen Benachrichtigungen zu schicken.

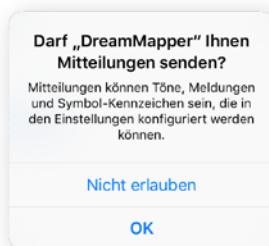

- c) Wählen Sie das Land Ihres Wohnsitzes aus und speichern Sie Ihre Angabe anschließend ab.



2. Benutzerkonto anlegen

- a) Geben Sie Vornamen, Nachnamen und E-Mail Adresse in den entsprechenden Eingabefeldern an.
- b) Wählen Sie ein persönliches Passwort, welches die Anforderungen erfüllt.

Willkommen!

Neues Konto erstellen

Vorname

Nachname

Deutschland

E-Mail-Adresse (erforderlich)

E-Mail-Adresse bestätigen (erforderlich)

Kennwort (erforderlich)

Kennwort bestätigen (erforderlich)

- c) Geben Sie die Seriennummer Ihres Therapiegeräts ein (13-stellige Nummer unter dem Barcode). Wahlweise können Sie die Seriennummer auch über die App einscannen.

Wenn Sie sich für das Einscannen der Seriennummer entscheiden, klicken Sie auf *Scannen*, um die Kamera-Funktion zu öffnen. Richten Sie die Kamera auf den Barcode an der Unterseite Ihres Therapiegeräts. Die Seriennummer wird automatisch erkannt und in das entsprechende Eingabefeld eingefügt.

Willkommen!

Scannen Ihres Geräts

WICHTIG: Wenn zu Ihrem Schlaftherapiegerät ein Luftbefeuchter gehört, dann entfernen Sie unbedingt die Wasserkammer, bevor Sie fortfahren.

Die Seriennummer befindet sich auf der Unterseite Ihres Geräts. Richten Sie die Kamera auf den Barcode an der Unterseite Ihres Therapiegeräts.

Kennwort bestätigen (erforderlich)

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass der Luftbefeuchter leer ist, bevor Sie das Gerät umdrehen.*

Seriennummer des Geräts (erforderlich) **Scannen**

Ich möchte über Neuigkeiten, Produkte und Werbeaktionen von Philips informiert werden.

Registrieren **Abbrechen**

Wenn Sie zukünftig von Philips über Produkte und Werbeaktionen informiert werden möchten, dann klicken Sie auf die nebenstehende Schaltfläche, die anschließend in Grün dargestellt wird. Dieser Service ist optional.

Klicken Sie anschließend auf **Registrieren.**

- d) Nehmen Sie die Endnutzer-Lizenzvereinbarung zur Kenntnis und bestätigen Sie den Datenschutzhinweis.
- e) Klicken Sie *Akzeptieren*, wenn Sie mit der Nutzungsvereinbarung des DreamMapper einverstanden sind.

[Klicken Sie hier um den Datenschutzhinweis zu bestätigen](#)

Willkommen!

Endnutzer-Lizenzvereinbarung
Deutschland - Datenschutzhinweis

**Endnutzer-Lizenzvereinbarung
Deutschland**

WICHTIG – LESEN SIE DIESE BEDINGUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE AUF DIESE SOFTWAREANWENDUNG ZUGREIFEN ODER SIE BENUTZEN.

Zum Akzeptieren des Datenschutzhinweises – Schaltfläche berühren

Akzeptieren **Ablehnen**


- f) Sobald Sie Ihr DreamMapper Benutzerkonto angelegt haben, erscheint folgendes Dialogfenster. Klicken Sie auf *Ja*, wenn Sie Ihr Therapiegerät mit Ihrem Smartphone oder Tablet über Bluetooth verbinden wollen.

Soll DreamMapper auf diesem Mobilgerät Bluetooth zur Übertragung Ihrer Therapedaten verwenden?

Nein **Ja**

3. Verbinden der DreamStation mit Smartphone/Tablet über Bluetooth

- a) Folgen Sie den Anweisungen des Bluetooth-Leitfadens im DreamMapper (siehe unten).
- b) Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auch auf Ihrem Smartphone oder Tablet eingeschaltet ist.

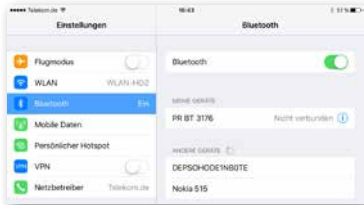

Beispiel: Bluetooth Einstellungen im Menü des iPhone/iPad



- c) Sobald die Aufforderung zum Herstellen einer Bluetooth-Verbindung erscheint, bestätigen Sie diese durch Auswahl der Option *Ja* und Drücken des DreamStation Drehknopfs. Anschließend werden DreamStation und Smartphone/Tablet miteinander verbunden.



Eine ähnliche Aufforderung zum Herstellen einer Bluetooth-Verbindung erhalten Sie ggf. auch auf Ihrem Smartphone/Tablet.

Hinweis: Nach Erscheinen einer Bluetooth-Verbindungsaufforderung muss diese innerhalb von ca. 5 Sekunden bestätigt werden. Ansonsten wird der Verbindungsversuch abgebrochen und muss erneut gestartet werden.

- d) Sobald eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde, ruft DreamMapper Daten von Ihrer DreamStation ab. Ist dieser Schritt abgeschlossen, können Sie mit der Nutzung von DreamMapper starten.

Hinweis: Sie können nur Therapiedaten ab dem Zeitpunkt des Einrichtens Ihres DreamMapper-Benutzerkontos in der App einsehen. Vorherige Daten sind nicht abrufbar.

